

MINTECH水素発生器の よくある質問

このところ、MINTECH水素発生器についての質問がとくに多くなってきましたので、よくある質問についてQ&Aを作成いたしました。ぜひご参考にしてください。

Q メンテナンス不要とありますが、何の交換もいらないのですか？



A 消耗品としての精製水の補給、交換（1カ月に2回）フィルターの交換（500時間）カニューラの交換（2週間）が必要です。

Q 一回の推奨吸引時間は？



A それぞれ吸入される方の状況によって異なります。

例えば1日2時間吸入なさる場合は朝1時間、夜1時間と分けて吸入された方が常に体内に水素が入る為、良いかと思えます。病気の原因とされる悪玉活性酸素が多い方は出来るだけ長時間吸われた方が良いかと思えます。
※水素発生は二時間で自動的にストップ。再度スタートボタンを押せば10時間までは続けて使用可能です。

Q 酸素と水素は別々になっているのですか？



A 水素と酸素は別々の出口から出てきます。水素濃度は99.995%で、吸入するのは水素だけとなっております。

Q ランニングコストはどれくらいかかりますか？



A 一時間使用で精製水と電気代は約3円程度です。フィルター（カートリッジ）は500時間で取り換えとなります。フィルターの価格は1,500円（税別、送料別）となります。

Q 消耗品について教えてください。

A ①精製水：



ミネラルウォーターではなく、必ず精製水をご使用ください。ドラッグストアで購入できます。精製水以外のご使用は、製品に支障が出ますのでお控えください。

②フィルター：



500時間の使用で交換サインが付きまので、交換してください。

フィルターは弊社すいすいbar楽天ショップにて1個1,500円（税別、送料別）で販売しております。

③カニューラ：



使用頻度によりますが、二週間に一回の交換をお勧めいたします。

MINTECH
株式会社メンテナンス
〒130-0022
東京都墨田区江東橋4-24-5
協新ビルディング401号室
TEL 03-5669-0986
FAX 03-5669-0987
E-mail: info@mintech.ne.jp
https://www.mintech.ne.jp/

編集後記
長かった梅雨も明け、本格的に暑い夏が到来いたしました。いかがお過ごしでしょうか。
週刊新潮7月4日号で「水素ガス吸引で万病退治・若返りは本当か」の記事が話題になっております。水素の人の対する効能はまだ研究中ですが、お客様の中にはその効果を実感している方が多いようです。
(田)

